

NOTICE



Temps de réalisation : 30 minutes



MASKIT

- 1** Munissez vous d'un marteau et une paire de ciseaux. Identifiez tous les éléments du kit ci-dessous.



2x Tissus



1x Barrette



8x Rondelles (+2)



1x Presse (+1)




1x Elastique




8x Oeillets (+2)

! Ne confondez pas la presse et les oeillets !


- 2** Centrez le petit tissu sur le grand. Assurez-vous que les trous soient bien alignés. Découpez un rectangle dans chaque coin du grand tissu. **Ne coupez pas dans les trous.**

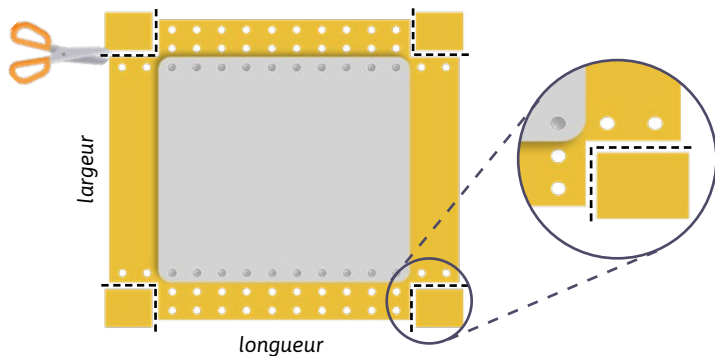

- 3** Pour chaque coin, insérez un oeillet dans le 2^e trou du petit tissu, en le glissant par le dessous du grand tissu.

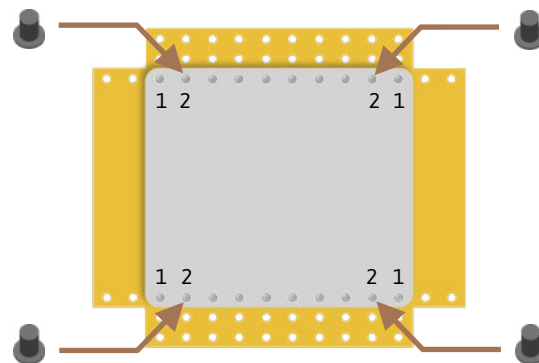


- 4** Pliez le tissu **3 fois** sur lui-même dans le sens de la largeur. Chaque trou doit se superposer sur le suivant. **Coin par coin**, enfiler les trous superposés sur l'oeillet. Si vous avez des difficultés, enfiler les trous sur la barrette.

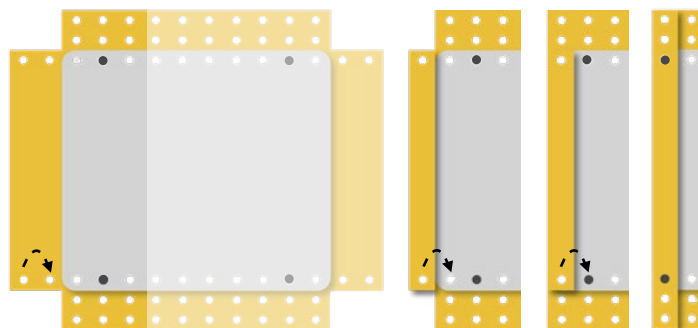

- 5 Répétez l'étape 4 de l'autre côté afin d'arriver à ceci :




Vérifiez que 6 trous séparent bien les deux oeillets.

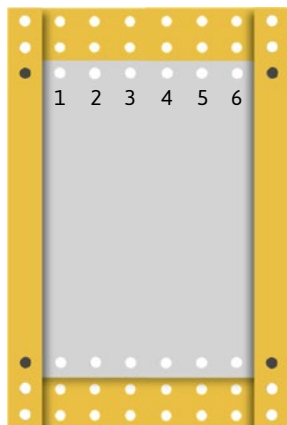


Ne fermez pas encore les oeillets.

- 7 Enfilez la rondelle (côté bombé vers le haut) au-dessus de toutes les couches de tissu.

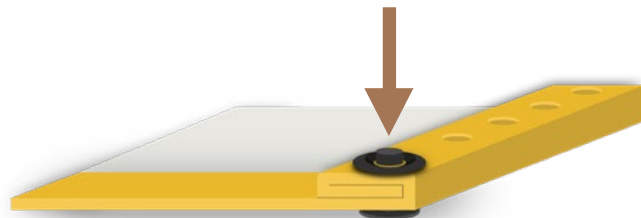


- 8 Insérez la presse dans l'oeillet, frappez bien droit avec le marteau sur une surface solide. Utilisez éventuellement une planche de cuisine. N'hésitez pas à frapper plusieurs fois. Retirez la presse une fois l'oeillet fermé.


! Attention, une fois l'oeillet fermé, il est impossible de l'enlever !

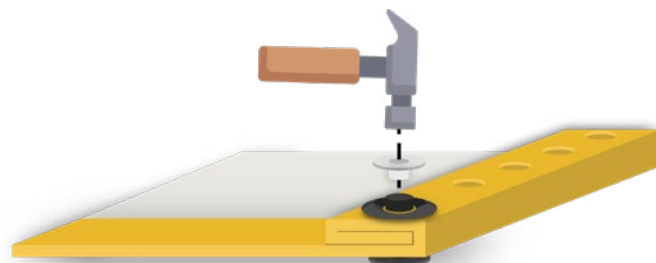


- 6 Choisissez un coin. Pliez le tissu **2 fois** dans la longueur. Chaque trou doit se superposer pour s'enfiler sur l'oeillet.

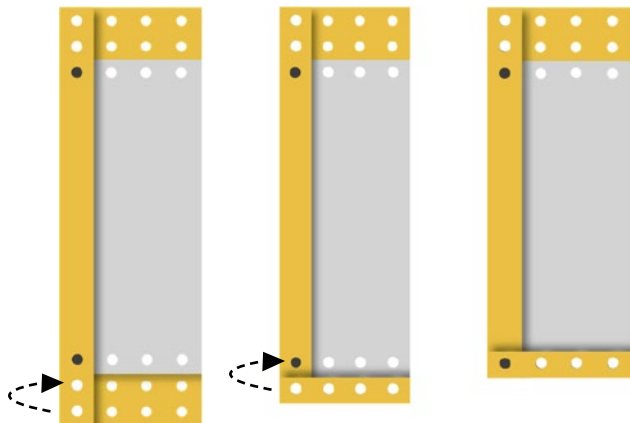


- 9 Fermez les 3 autres coins en répétant les étapes 6 à 8. Voici le résultat : 6 trous séparant les 2 oeillets de chaque côté.

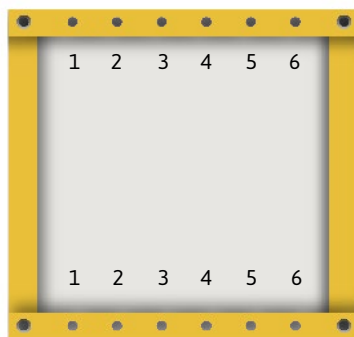


- 10 Réalisez la pliure centrale. Avant tout, **vérifiez l'alignement de tous les trous** et puis enfiler un oeillet dans le 3^e trou. Pliez le tissu pour que le 2^e trou s'enfile à son tour sur l'oeillet.

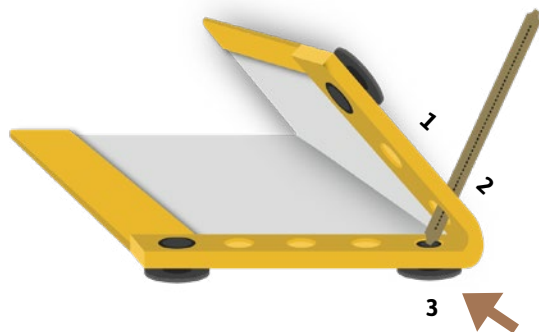

- 11 Pliez le tissu en sens inverse, pour que le 1^e trou s'enfile à son tour sur l'oeillet. Les 3 trous doivent être enfilés sur l'oeillet afin que le tissu soit plié en accordéon.

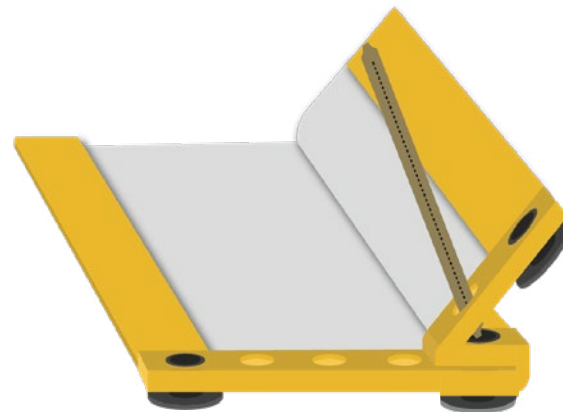

- 12 Vérifiez que le tissu est plié comme ci-dessous. Si c'est le cas, fermez l'oeillet comme aux étapes 7 et 8.

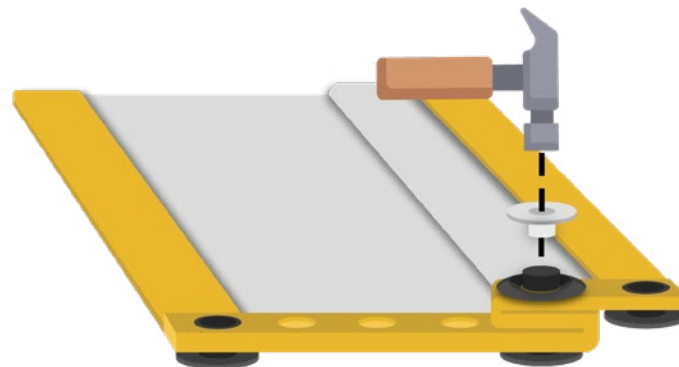

13 Faites les 3 autres plis en répétant les étapes 10 à 12 pour arriver à l'image ci-dessous. Frappez à nouveau les 8 oeilletons jusqu'à ce qu'ils ne tournent plus dans le tissu.


Bien fermé, l'oeillet évite que le tissu s'effiloche.




Préparation

MaskIT recommande la mise en place ci-dessous.

L'élastique, mis comme ci-dessous, pour un réglage facile et une bonne tenue du masque sur le visage.

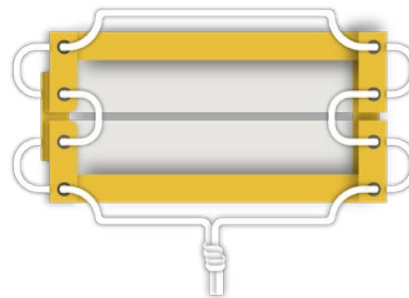

La barrette en guise de pince-nez. Déroulez un des deux plis, placez la barrette et refermez-le.

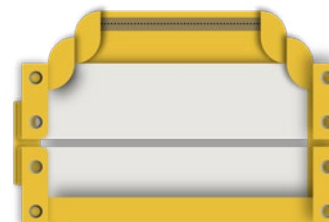

Un filtre (non compris) pour une protection idéale. Le masque reste conforme catégorie 2 AFNOR même sans filtre. Ouvrez les deux côtés du masque pour y placez le filtre.

NOTICE D'UTILISATION



Mettre le masque

1. Lavez vos mains avec du savon pendant 30 secondes.
2. Placez le masque sur la bouche et le nez. Attachez-le avec l'élastique derrière la tête. Appuyez sur la barrette pour qu'elle prenne la forme du nez.
3. Ajustez le masque pour couvrir l'entiereté du nez. La partie inférieure doit se trouver sous le menton.



Retirer le masque

1. Lavez vos mains avec du savon pendant 30 secondes.
2. Enlevez le masque par les élastiques, ne touchez pas la partie en tissu.
3. Rangez le masque dans un sachet en plastique ou dans une enveloppe, ou lavez-le directement.



Bonnes pratiques

Changez de masque s'il est mouillé ou sale.

Évitez de toucher l'extérieur du masque. Si vous le touchez, lavez-vous immédiatement les mains.

Le masque peut être utilisé plusieurs fois pendant 4h, seulement si : il est retiré correctement et rangé de manière à éviter les contacts.


Ne le portez pas sur la tête ou sous le menton. Respectez toujours la distanciation sociale.



Lavage du masque

Vous pouvez le laver à la machine à 60°C ou le faire bouillir pendant 20 minutes.

Séchez le masque directement après le lavage.

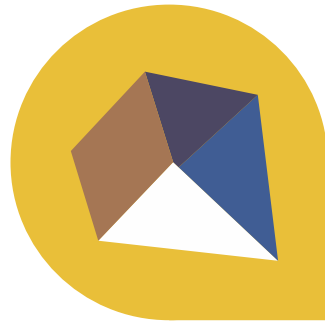

MASKIT



Ce masque appartient à la
catégorie 2 de la norme AFNOR
& NBN/DTD S 65-001:2020



Retrouvez la vidéo explicative
sur www.maskit.be



This manual is also available
in english on www.maskit.be



WWW.MASKIT.BE