

HANDLEIDING



Doorlooptijd : 30 minuten



MASKIT

- 1** Neem een hamer en een schaar.
Identificeer alle onderstaande items uit de kit.



2x Stof



1x Staafje



8x Sluitringen (+2)



1x Pers (+1)




1x Elastiek




8x Oogjes (+2)

! Verwar de oogjes & pers niet met elkaar !


- 2** Centreer de kleine stof op de grote. Zorg ervoor dat alle gaten mooi overeenkomen. Knip een rechthoek uit elke hoek van de grote stof. **Knip niet in de gaten.**

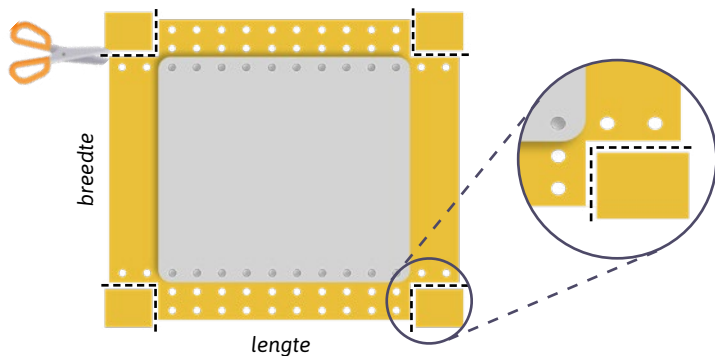

- 3** Steek voor elke hoek een oogje in het tweede gat van het kleine stuk stof, en schuif dit door de onderkant van de grote stof.

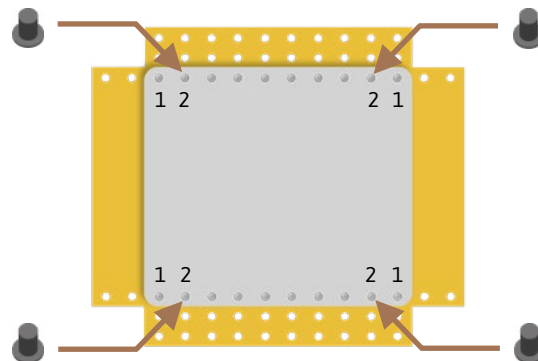


- 4** Plooi de stof **driemaal** op zichzelf in de richting van de lengte. Elk gat moet zich boven het volgende bevinden. Rijk **hoek voor hoek**, de over elkaar geplaatste gaten over het oogje. Als dit moeilijk gaat, rijg dan de gaten over het staafje.

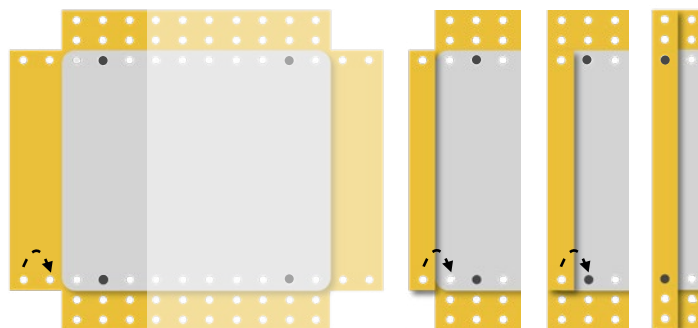

- 5 Herhaal stap 4 aan de andere kant om vervolgens hier te eindigen:





Controleer of 6 gaten de twee oogjes goed van elkaar scheiden.

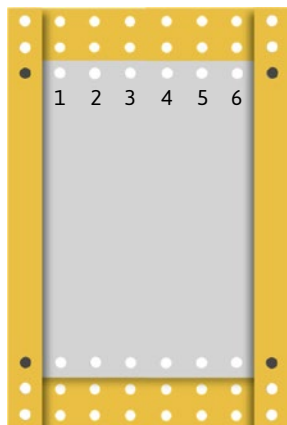


Sluit de oogjes nog niet.

- 7 Rijg de sluitring (met de ronde kant naar boven) over alle lagen stof.

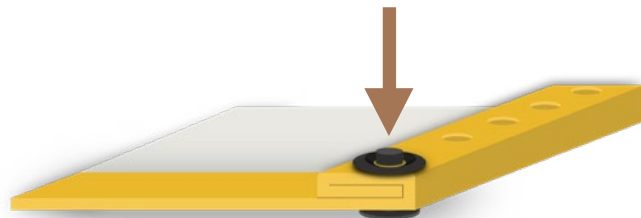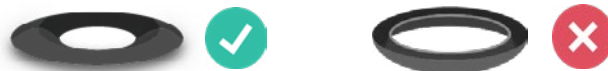


- 8 Steek de pers in het oogje, en sla er recht op met de hamer op een stevige ondergrond. Aarzel niet om meerdere keren te slaan. Verwijder de pers nadat het oogje is gesloten.


! Opgepast, eenmaal dat het oogje is gesloten, kan het niet meer verwijderd worden !

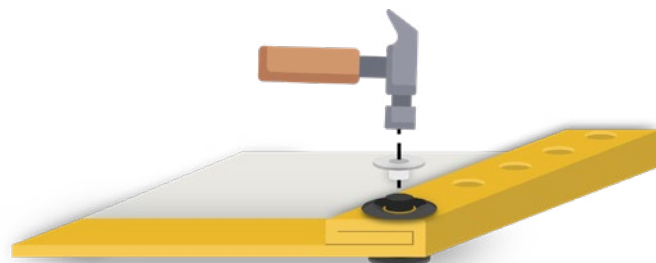


- 6 Kies een hoek. Plooi de stof **2 maal** in de lengte. Elk gat moet overlappen om over het oogje te kunnen geregen worden.

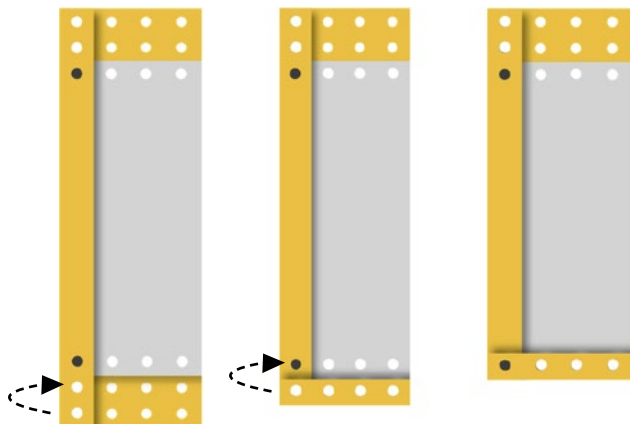


- 9 Sluit de 3 andere hoeken door stappen 6 tot 8 te herhalen. Dit is het resultaat: 6 gaten die de twee oogjes van elke kant van elkaar scheiden.

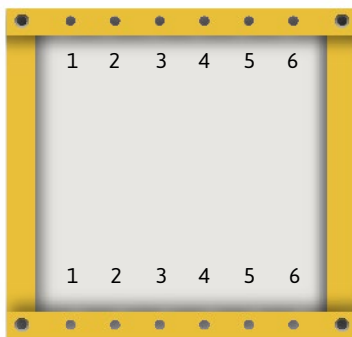


- 10 Maak de centrale vouw. **Controleer allereerst de uitlijning van alle gaten** en rijg vervolgens een oogje door het 3de gat. Vouw de stof zodat het 2de gat op zijn beurt over het oogje wordt geregen.

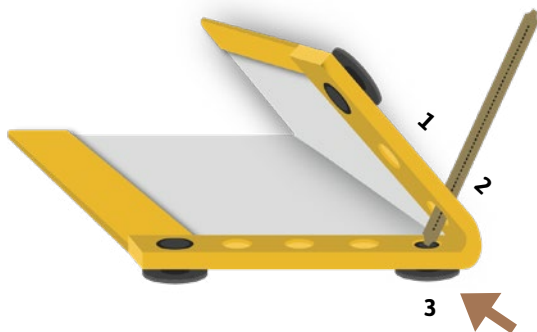

- 11 Vouw de stof in de tegenovergestelde richting, zodat het eerste gat op zijn beurt over het oogje wordt geregen. De 3 gaten zouden nu over het oogje moeten geregen zijn, zodat de stof als een accordeon is gevouwen.

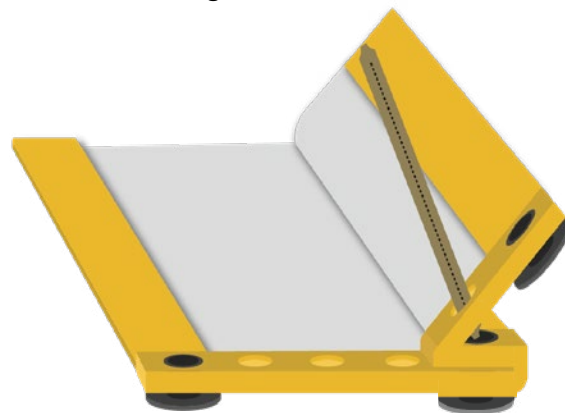


- 12 Controleer of de stof is gevouwen zoals hieronder. Als dit het geval is, sluit dan het oogje zoals in stap 7 en 8.

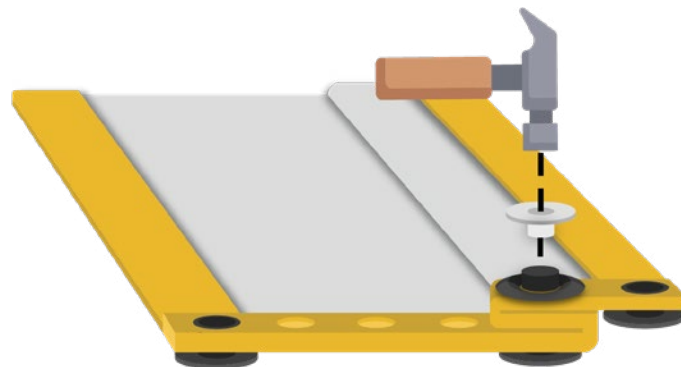

- 13** Maak de 3 andere plooien door stap 10 tot 12 te herhalen, om te eindigen bij het beeld hieronder. Sla opnieuw op de 8 oogjes totdat ze niet meer in de stof ronddraaien.


Het oogje voorkomt, als het goed is gesloten, dat de stof nadien gaat rafelen.

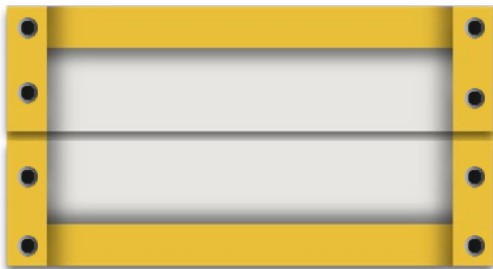


Vorbereiding

MaskIT beveelt onderstaande plaatsing aan.

De elastiek, geplaatst zoals hieronder, voor een gemakkelijke afstelling en een goede grip van het masker op het gezicht.

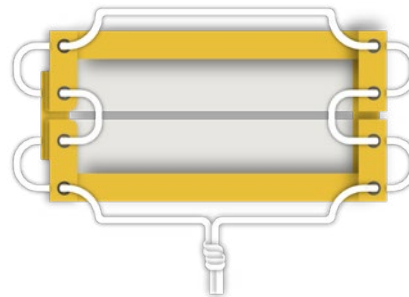

Het staafje als neusknijper. Ontploo één van de twee vouwen, steek het staafje er tussen en sluit ze.

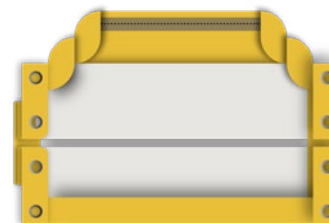

Een filter voor een ideale bescherming. Het masker blijft conform categorie 2 AFNOR, zelfs zonder filter. Open de twee kanten van het masker om de filter er in te plaatsen.

INSTRUCTIEHANDLEIDING



Het masker aandoen

1. Was uw handen met zeep gedurende 30 seconden.
2. Plaats het masker op de mond en neus. Maak het vast met de elastiek achter het hoofd. Duw op het staafje zodat het de vorm van de neus aanneemt.
3. Pas het masker aan zodat het mond en neus goed afdekt. Het onderste deel van het masker moet zich onder de kin bevinden.



Het masker afzetten

1. Was uw handen met zeep gedurende 30 seconden.
2. Doe het masker af door aan de elastieken te komen. Raak het stof gedeelte niet aan.
3. Doe het masker in een plastic zakje of een papieren envelop, of was het meteen.



Goede praktijken

Verwissel van masker als dit nat of vuil is.

Vermijd het aanraken van de buitenkant van het masker. Als u het toch aanraakt, was dan onmiddellijk de handen.



Het masker kan meerdere keren gebruikt worden gedurende 4h, maar alleen als: het correct wordt afgezet en opgeborgen op een manier om contact te vermijden.

Draag het niet op het hoofd of onder de kin. Respecteer altijd de sociale afstand.



Het wassen van het masker

U kan het masker in het wasmachine wassen op 60°C, of het laten koken gedurende 20 minuten.

Droog het masker meteen na het wassen.



Dit masker behoort tot de categorie 2 van de norm AFNOR & NBN/DTD S 65-001:2020



U vindt het verklarende filmpje op www.maskit.be



This manual is also available in english on www.maskit.be



WWW.MASKIT.BE